

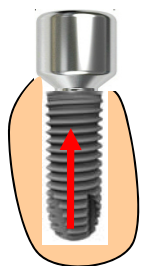
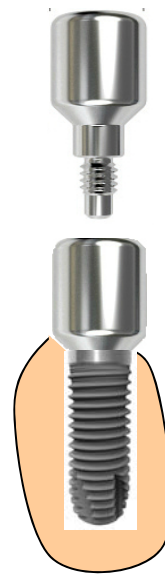
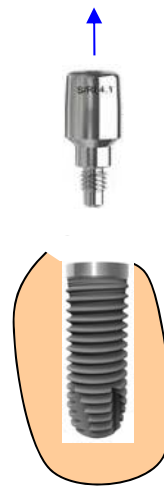
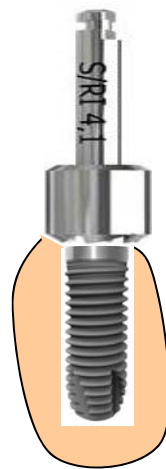


заглушка

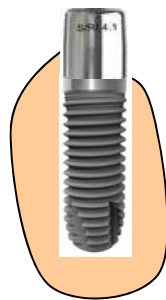



 **BEGO**
BONE PROFILER

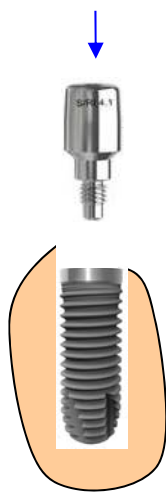

1. На имплантат устанавливается направляющий штифт с моментом $\leq 10 \text{ Ncm}$

2. Удаление окружающей кости с помощью BONE PROFILER, используя охлаждение водой

3. Извлекается направляющий штифт и устанавливается формирователь десны

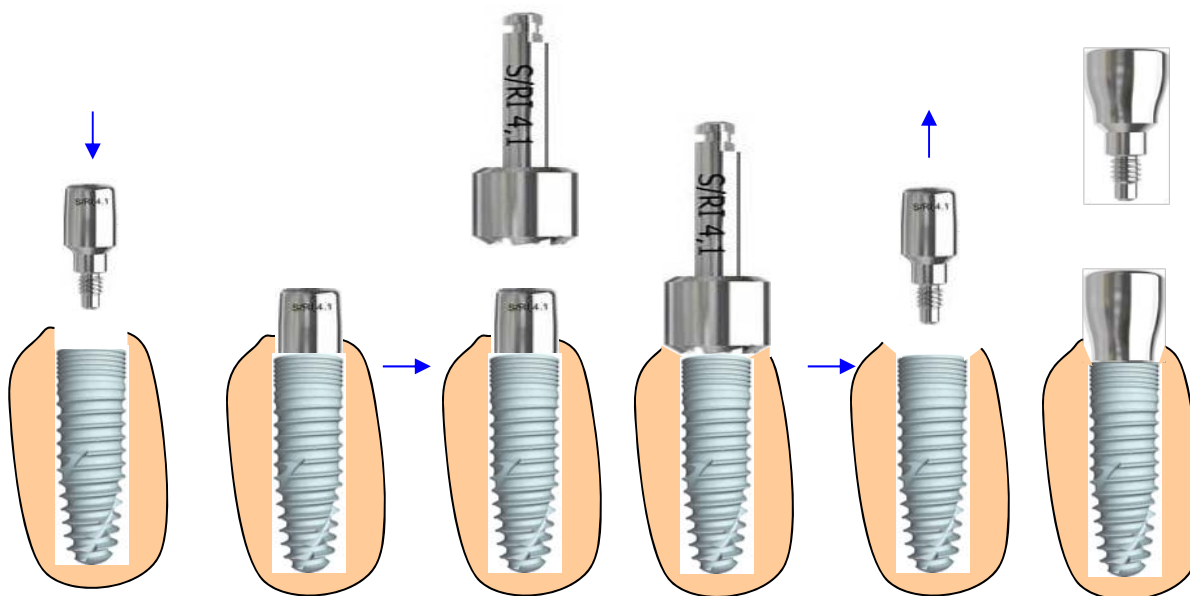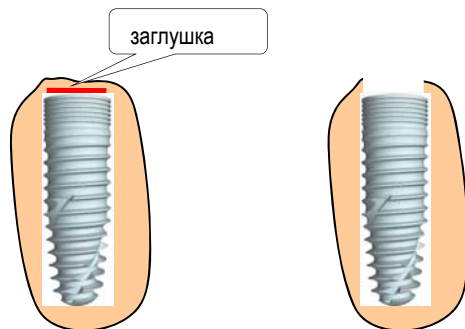

1. На имплантат устанавливается направляющий штифт с моментом ≤ 10 Ncm

2. Удаление окружающей кости с помощью BONE PROFILER, используя охлаждение водой

3. Извлекается направляющий штифт и устанавливается формирователь десны